

# Topilase<sup>®</sup>

## Protocolo de aplicación

- Presionar el compartimento superior para liberar las enzimas en la solución
- Agitar enérgicamente el frasco
- Una vez vaciado, tire el compartimento superior y enrosque la punta dosificadora en el compartimento inferior
- Agitar de nuevo el frasco
- Aplicar unas gotas de Topilase<sup>®</sup> en la zona a tratar y extender el producto con las manos enguantadas
- Masajear bien la zona durante 3-4 minutos
- Eliminar el exceso de producto

## Espaciamiento de los cuidados

El número de sesiones depende:

- del resultado deseado
- del tipo de ácido hialurónico inyectado
- de la fecha en que se inyectó la zona
- del nivel en el que se inyectó la zona

Cada aplicación de Topilase<sup>®</sup> debe espaciarse en intervalos de una semana

Se necesitarán una media de 3 sesiones

1<sup>a</sup> sesión en D-0 / 2<sup>a</sup> sesión en D-7 / 3<sup>a</sup> sesión en D-14

## Conservación

- Máximo 14 días en el refrigerador una vez abierto

**Topilase**<sup>®</sup>  
es una herramienta  
innovadora que  
permite ajustar las  
irregularidades  
vinculadas a las  
inyecciones de ácido  
hialurónico. Se trata  
de un nuevo esencial,  
no invasivo, eficaz y  
sin efectos  
secundarios.



Comparta su experiencia con  
Topilase<sup>®</sup> y etiquetenos



**@softfil\_international**



**SCAN ME**